

## Medidor CONTOUR®PLUS



### Use exclusivamente tiras reactivas CONTOUR®PLUS

**Extremo cuadrado gris:** Inserte este extremo en el puerto para tiras reactivas.

**Punta para la muestra:** La muestra de sangre se absorbe aquí.



Consulte la Guía del usuario de CONTOUR®PLUS y el folleto informativo del dispositivo de punción para ver las instrucciones completas.


### ⚠ ADVERTENCIA

Siempre lave bien sus manos con agua y jabón y séquelas antes y después de realizar análisis o de manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.


**PRECAUCIÓN:** El dispositivo de punción suministrado con su kit está diseñado para el autodiagnóstico exclusivo de un paciente. Debido al riesgo de infección, no debe ser utilizado por más de una persona.

### Análisis básico: yema de los dedos

1. Retire la cápsula de punción del dispositivo de punción.
2. Afloje la tapa protectora redonda de la lanceta girándola un cuarto de vuelta, pero no la retire.

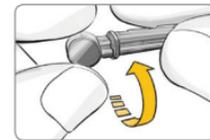

3. Inserte con firmeza la lanceta en el dispositivo de punción hasta que se detenga por completo.

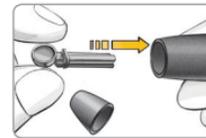

4. Gire y desprenda la tapa protectora redonda de la lanceta.




5. Vuelva a colocar la cápsula de punción.



6. Ajuste el indicador de la cápsula de punción a la profundidad de punción deseada.



7. Inserte el extremo cuadrado gris de la tira reactiva en el puerto para tiras reactivas del medidor.

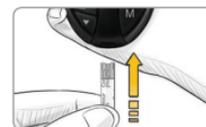

El medidor se encenderá y en la pantalla aparecerá una tira reactiva con una gota de sangre destellante. El medidor ya está listo para realizar el análisis.

8. Presione el dispositivo de punción firmemente contra el lugar de punción y presione el botón de liberación.



Frote la mano y el dedo hacia el lugar de punción para que se forme una gota de sangre.

9. Toque inmediatamente la gota de sangre con la punta de la tira reactiva. **Mantenga la tira reactiva en contacto con la gota de sangre hasta que el medidor emita un sonido.**



Análisis en la yema del dedo

Si la primera gota no es suficiente, el medidor pitará dos veces. Usted tiene aproximadamente 30 segundos para agregar más sangre a la misma tira reactiva. El resultado aparecerá después de la cuenta regresiva de 5 segundos.

10. **Para apagar el medidor, extraiga la tira reactiva.**



Deseche la tira reactiva como residuo médico o según las indicaciones del profesional de la salud que lo atiende.

### PRECAUCIÓN:

- El dispositivo de punción suministrado con su kit no es adecuado para uso por profesionales de la salud. Debido al riesgo de infección, no debe ser utilizado por más de una persona.
- Para retirar la lanceta del dispositivo de punción, consulte las instrucciones detalladas del folleto informativo del dispositivo de punción.
- Los gráficos del dispositivo de punción se ofrecen solamente como ilustración.

Para obtener ayuda, comuníquese con la oficina de servicio de atención al cliente en su país.

Consulte la información de contacto en la contraportada de la guía del usuario.

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

### ⚠️ ADVERTENCIA: Riesgo biológico potencial

Todos los sistemas de medición de glucosa en sangre se consideran un riesgo biológico.

Los profesionales de la salud o las personas que utilicen este sistema en varios pacientes deberán seguir el procedimiento de control de infecciones aprobado por su institución. Todos los productos u objetos que entren en contacto con sangre humana, incluso después de la limpieza, deben manejarse como si fuesen capaces de transmitir enfermedades infecciosas. El usuario deberá seguir las recomendaciones de prevención de enfermedades de transmisión sanguínea en establecimientos sanitarios relativas a muestras humanas potencialmente infecciosas.

Para obtener información sobre las patentes y otras licencias relacionadas, consulte [www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

© 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.

Ascensia, el logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts y el logotipo No Coding (Autocodificación) son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

## Uso del Modo avanzado

### Configuración del medidor en Modo avanzado

Para configurar el medidor en el Modo avanzado y aprovechar los marcadores de comidas y otras funciones a su alcance:

1. Pulse **M** para encender el medidor.
2. Mantenga pulsado **▲** o **▼** durante 3 segundos.
3. L-1 destellará.
4. Pulse **▲** o **▼** para cambiar a L-2.
5. Pulse **M** para confirmar.



Para obtener ayuda, comuníquese con la oficina de servicio de atención al cliente en su país.

Consulte la información de contacto en la contraportada de la guía del usuario. [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

## Una vez que haya realizado un análisis y visto los resultados, utilice los marcadores en la pantalla:

Para marcar resultados >	Usted verá >	Para configurar >	Usted verá >	Qué significa >	Uso del recordatorio
<b>Antes de las comidas</b> Indica el resultado de un análisis realizado antes de comer. Pulse <b>▲</b> o <b>▼</b> .		Pulse <b>M</b>		El resultado se marca como un análisis antes de la comida. Presione <b>M</b> otra vez para configurar un recordatorio de análisis después de la comida.	<p>Cuando el recordatorio suena, el medidor se enciende y muestra el resultado del análisis antes de comer.</p> <p>Presione cualquier botón una vez para silenciar el recordatorio, y dos veces para apagar el medidor. Realice otro análisis de sangre y márkelo con un marcador  después de la comida (consulte el cuadro a la izquierda).</p>
<b>Después de las comidas</b> Indica el resultado de un análisis realizado después de comer. Pulse <b>▲</b> o <b>▼</b> .		Pulse <b>M</b>		El resultado se marca como análisis después de la comida.	
<b>Diario</b> Marca cualquier resultado como algo singular o diferente de alguna manera. Pulse <b>▲</b> o <b>▼</b> .		Pulse <b>M</b>		El resultado se marca en la memoria como singular. Debe anotarlo en su diario.	

Configura un recordatorio (preconfigurado en 2 horas) para realizar un análisis después de la comida. Consulte la guía del usuario, donde encontrará instrucciones completas sobre cómo usar los marcadores y ajustar la hora de los recordatorios.

## Códigos y símbolos de error

Consulte la guía del usuario, donde encontrará una lista completa.

<b>E1</b>	La temperatura está fuera de los límites.
<b>E2</b>	Hubo un problema para llenar por completo la tira reactiva. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.
<b>E3</b>	El medidor detecta el uso de una tira reactiva usada o una solución de control equivocada. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.
<b>E11</b>	Resultado anormal. Vuelva a realizar el análisis con una tira reactiva nueva.

Importado y distribuido por:  
Laboratorios Temis Lostaló S.A.,  
Zepita 3178, C1285ABF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
República Argentina. D.T.: Pablo Stahl, Farmacéutico.

Autorizado por ANMAT. Certificado N° 8496  
Tel: 0800-999-9548  
info@temislostalo.com.ar  
www.temislostalo.com.ar

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
Venta Libre

Fabricado en Indonesia  
Para:  
Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland/Suiza

ASCENSIA  
Diabetes Care

2797

90005475 Rev. 12/19